

Elara - Autoclaves de sobremesa Clase B

Para clínicas médicas y dentales



Elara - Autoclaves de sobremesa Clase B

Funcionamiento y resultados excepcionales

- ▶ **AUTOCLAVE DE LARGA VIDA**
- ▶ **CONVENIENTE**
- ▶ **AHORRA ENERGIA**
- ▶ **30% MAYOR CAPACIDAD**
- ▶ **SEGURO**




El autoclave de sobremesa Elara es un autoclave Clase B, diseñado para las necesidades de las clínicas modernas, en las que se espera que los autoclaves cumplan con los estándares internacionales más sofisticados y operen cada día en forma ininterrumpida. Los autoclaves Elara están diseñados para las necesidades de esterilización de las clínicas médicas, dentales y veterinarias.

Siendo una empresa familiar, Tuttinauer viene fabricando productos por más 95 años, ganándose una excelente reputación por su calidad, alto rendimiento, características sofisticadas y su capacidad para satisfacer las expectativas del cliente. Más de 350 000 autoclaves instalados en todo el mundo son la prueba de la confianza que merecen los productos para la esterilización y el control de infecciones de Tuttinauer.



Rendimiento Clase B

El rendimiento de Clase B se logra con una bomba de vacío incorporada, utilizada para la remoción fraccionada del aire por pre-vacío, eliminando las bolsas de aire de todos los tipos de carga y maximizando la penetración eficiente del vapor en toda la carga. Al finalizar la etapa de esterilización, se utiliza la bomba de vacío para el secado.

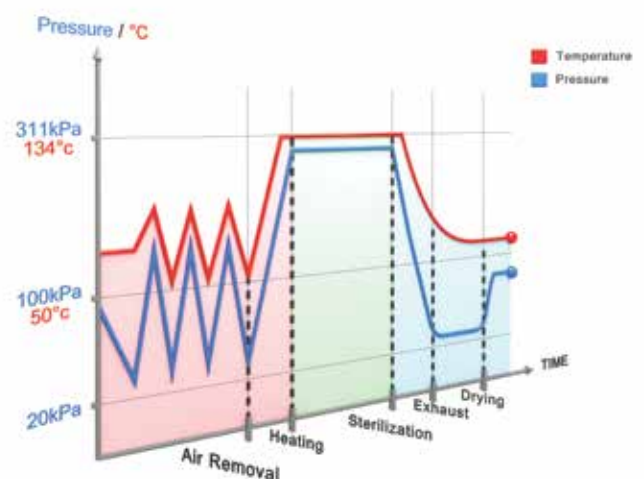

AUTOCLAVE DE LARGA DURACIÓN



Acero inoxidable de calidad superior

- Cámara de acero inoxidable 316L con acabado de electro-pulido, de mayor duración que las cámaras de acero inoxidable 304
- Puerta de acero inoxidable con pulido tipo espejo. Altamente resistente a la corrosión

Sistema integrado para el control de la calidad del agua

- El control automático de calidad del agua alerta al usuario sobre la existencia de agua de baja calidad protegiendo a la cámara de los minerales corrosivos presentes en ésta



CONVENIENTE



Llenado de agua

- El llenado frontal de agua permite utilizar el espacio libre por encima del autoclave
- Es posible el llenado de agua por la parte superior
- La alimentación automática del agua (opcional) llenará automáticamente el depósito de agua del autoclave



Puerta

- Puerta con bloqueo automático, diseñada para poder ser abierta o cerrada con una sola mano



AHORRO DE ENERGIA



Llenado de agua

- **Modo de descanso** - le permite al usuario establecer el horario en el que el esterilizador pasará a consumir un mínimo de energía
- **Ciclo con tarifa baja** - Al fijar una hora de inicio retardado, Ud. puede operar su esterilizador cuando los precios de la energía eléctrica son bajos, como por ejemplo, después del horario de trabajo

30% DE CAPACIDAD EXTRA

30% más de superficie de bandeja/charola

- Ud. obtiene mayor espacio en las bandejas/charolas, en comparación con otros autoclaves que ofrecen cámaras de 17 a 20 litros
- Mayor capacidad en cada ciclo significa menos ciclos por día, ahorrando energía y agua



Standard Tray Capacity

Tuttnauer Tray Capacity



SEGURIDAD



Características de seguridad


- Dos mecanismos diferentes de bloqueo impiden que la puerta se abra mientras la cámara está presurizada
- El ciclo no comienza si la puerta no está cerrada
- La puerta no se abrirá antes de que la presión de la cámara baje a la presión atmosférica



Panel de control

Pantalla multicolor innovadora

Panel LCD brillante para una fácil lectura, con interfaz multilingüe (26 idiomas).

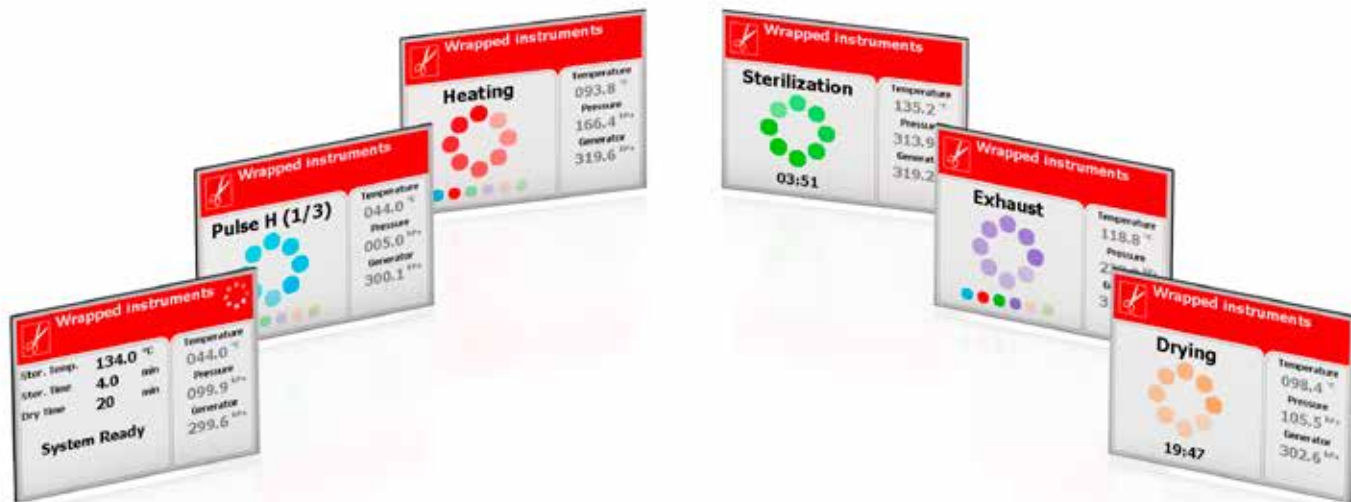

Parámetros de ciclo

Configuración de parámetros para temperatura, tiempo de esterilización y tiempo de secado



Valores medidos en tiempo real

Muestra los valores de la temperatura y presión de la cámara y presión del generador de vapor.

Teclado sencillo

Un teclado de tres botones, le permite al usuario navegar con facilidad por los programas del ciclo de esterilización y por el menú del usuario

Impresora térmica

Impresora incorporada de alta calidad (opcional) para impresiones en papel.



Información digital del ciclo en su PC

Guarde los archivos con los datos de ciclo en su PC sin necesidad de software adicional o hardware especializado. Conexión USB incluida.




Conecte la memoria USB



Seleccione "Exportar Historia"



Conecte la memoria USB a su PC

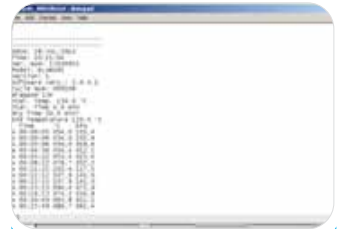

Visualice los archivos con los datos de ciclo en su PC

Opcional



Genere informes con R.P.C.R

Software R.P.C.R

Informes remotos en su PC (software opcional para PC)


Registro automático de la información del ciclo en su PC

Informes en los que Ud. puede confiar

- Registro automático de la información del ciclo en cualquier PC de su red (conexión Ethernet en la parte posterior del autoclave)
- Cómodo acceso a gráficos y tablas de fácil comprensión
- Genere fácilmente informes PDF
- No es necesaria la impresión de archivos, lo que ahorra tiempo

Mantenga el control con el Monitoreo Remoto en tiempo real

- Vea la pantalla de su PC en tiempo real
- Monitoree la actividad de hasta 8 autoclaves

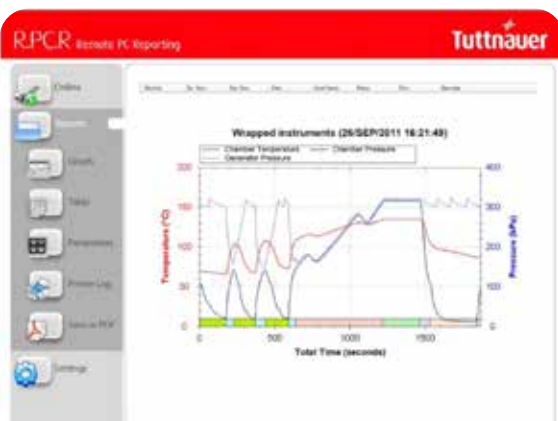

Con R.P.C.R Ud. puede ver: gráficos de los datos del ciclo, información numérica del ciclo, impresiones del ciclo, tabla de valores medidos, tabla de parámetros.


Elara 9D

Clase B de alta velocidad

- Ciclos rápidos con un potente generador de vapor integrado



Elara 9 cargado con cuatro bandejas de acero inoxidable (asa incluida)

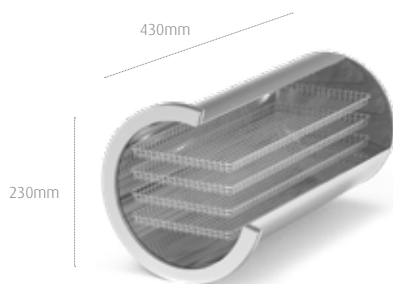

Elara 9 cargado con dos casetes IMS enteros y dos medio casetes. Necesita soporte especial (opcional)

19.8 Litros

Cámara de acero inoxidable 316L


Especificación técnica

Modelo	Volumen de la cámara	No. de bandejas/charolas	Superficie utilizable de la bandeja (P x A) (en mm)	Capacidad de bolsas estándar	Capacidad de casetes IMS
Elara 9D	19.8 Litros	4	415 x 170	16 bolsas	Entero X 2 + Medio X 2
Elara 11D	28.5 Litros	6	415 x 170	24 bolsas	Entero X 4 + Medio X 4

Elara 11D

Clase B de alta velocidad

- Ciclos rápidos con un poderoso generador de vapor incorporado

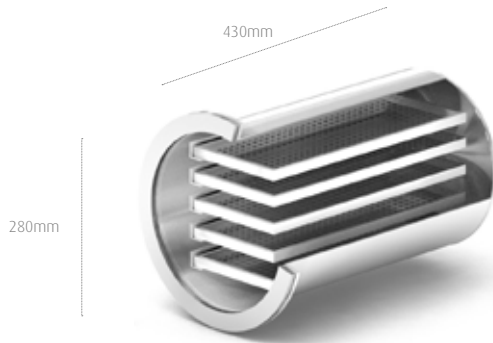

28.5 Litros Cámara de acero inoxidable 316L



Elara 11 cargado con cuatro casetes IMS enteros y cuatro medio casetes



Elara 11 cargado con cinco bandejas de acero inoxidable (asa incluida)

Programas de esterilización

5 programas preestablecidos. 2 programas de prueba: Bowie y Dick y prueba de fugas. 20 programas personalizables.

La prueba Bowie y Dick, también adecuada para el dispositivo de prueba de Helix, incluye un tiempo de esterilización de 3,5 min sin secado.

La prueba de fuga verifica que no haya pérdidas en la cámara al estar bajo vacío.

Programa de Ciclo	Tipo de carga	Temp. °C	Tiempo de esterilización (min)	Tiempo de secado (min)		Duración del ciclo (en min)*	
				Elara 9D Elara 11D	Elara 9D	Elara 11D	
No empaquetados 134	Instrumentos no empaquetados	134	4	1	17	21	
Empaquetados 134	Instrumentos empaquetados	134	4	20	24	27	
No empaquetados 121	Instrumentos no empaquetados delicados	121	20	1	32	34	
Empaquetados 121	Instrumentos empaquetados delicados	121	20	20	34	37	
Prion 134	Prion	134	18	20	34	41	

* La duración de los ciclos se basa en una carga estándar de 1,5 kg y no incluye secado. La duración de los ciclos se basa en que la cámara esté caliente y puede variar según el tamaño de la carga.

Normas y Directivas

Lista parcial de normas y directivas:

Normas de calidad

- ISO 9001:2015 - Sistemas de Control de Calidad
- EN ISO 13485:2016 Sistemas de Control de Calidad – Equipos médicos

Directivas

- MDD 93/42/EEC rectificada por Directiva 2007/47/EC
- PED 2014/68/EU - Directiva para Equipos de Presión
- 2012/19/EU WEEE y 2017/2102 RoHS

Normas

- EN 13060:2014+A1:2018 - Esterilizadores pequeños
- EN 61010-1: 2010 Requisitos de seguridad para el control de medición y uso en laboratorio
- EN 61326-1: 2013 Equipos eléctricos para requerimientos EMC
- EN 61010-2-40: 2015 Requisitos de seguridad para los esterilizadores utilizados para tratar material médico.

Especificación Técnica de Elara 9 y Elara 11

Modelo	Tensión (V) Freq. (Hz)	Potencia (W) Corriente (A)	Dimensiones externas PxAxH (mm)
Elara 9	230V 50/60Hz	Elara 9D 2200W/10A	660 x 485 x 440
Elara 11	230V 50/60Hz	Elara 11D 2200W/10A	660 x 530 x 440

Accesorios

Máquina selladora

Garantiza que los instrumentos esterilizados permanezcan sellados después de la esterilización y mantengan una perfecta esterilidad durante su vida útil.



Destilador de agua

Use agua libre de minerales, para proteger su autoclave y sus instrumentos a una fracción del costo del agua destilada embotellada.



Limpiadora ultrasónica

La limpieza por ultrasonidos es un procedimiento seguro y eficaz que garantiza una limpieza perfecta.



Aprenda de nuestros expertos

Suscríbese a nuestro blog www.tuttinauer.com/blog



Elara - Autoclave de sobremesa Clase B para consultorios médicos y dentales

Ventas y Marketing internacionales
E-mail: info@tuttinauer-hq.com
www.tuttinauer.com

Tuttinauer Europe b.v.
Hoeksteen 11, 4815 PR
P.O.B. 7191, 4800 GD Breda
The Netherlands
Tel: +31 (0) 765 423 510, Fax: +31 (0) 765 423 540
E-mail: info@tuttinauer.nl

Tuttinauer USA Co.
25 Power Drive,
Hauppauge, NY 11788
Tel: +800 624 5836, +631 737 4850 Fax: +631 737 0720
E-mail: info@tuttinauer.com


Su Socio en la Esterilización y el Control de Infecciones

Distribuido por: